

MonlabTest®

COMBO 2 en 1

Pneumo+Legio


Realice a la vez con una sola muestra *S.pneumoniae* y *Legionella pneumophila*.

Ref MO-804037 Pres 20 tests Observaciones Detección antígenos *S.pneumoniae* - *L.pneumophila* grupo 1 en orina.

Incluye control + y control -



Modo de empleo

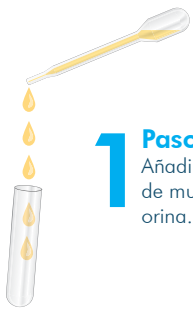

1 Paso
Añadir 6 gotas de muestra de orina.




2 Paso
Añadir 2 gotas del Reactivo y homogeneizar la muestra.



3 Paso
Añadir 3 gotas en "A" y 3 gotas en "B".

15 min

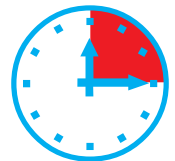

4 Paso
Leer resultados.

	Sensibilidad	Especificidad	PPV	NPV
<i>S. pneumoniae</i> MonlabTest® vs. Binax NOW® Streptococcus pneumoniae Antigen Card	89.2% (C.I. 74.6 – 97%)	98.6% (C.I. 92.7 – 100%)	97.1% (C.I. 84.7 – 99.9%)	94.8% (C.I. 87.2 – 98.6%)
<i>Legionella</i> MonlabTest® vs. Binax NOW® Legionella Urinary Antigen Card	100% (C.I. 88.8 – 100%)	99.2% (C.I. 95.4 – 100%)	96.9% (C.I. 83.8 – 99.9%)	100% (C.I. 96.9 – 100%)



Compatible sistema Skanflexy®

MONLAB

SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

MonlabTest®

INDIVIDUAL **1** en **1**

S. pneumoniae

Ref
MO-804036

Pres
20 tests

Observaciones
Detección antígenos
S.pneumoniae en orina.

Incluye control + y control -



Legionella

Ref
MO-804003

Pres
20 tests

Observaciones
Detección antígenos *Legionella pneumophila* grupo 1 en orina.

Incluye control + y control -



SkanFlexi®



Todas nuestras pruebas rápidas son compatibles con el sistema SkanFlexi®.

Sistematice sus pruebas rápidas de forma eficiente y segura a un precio económico.



MONLAB SL, Calle Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona - Spain
Tel: +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894



www.monlab.es
pedidos@monlab.es