



Lector pruebas rápidas



SERVICIOS PARA LABORATORIOS  
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

## SkanFlexi®

Lector de pruebas rápidas para la  
detección de drogas de abuso



La sistematización en la lectura de sus  
pruebas rápidas de una forma eficiente y  
segura a un precio económico.

 SKANNEX



MONLAB SL - Carrer Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona  
Tel : Tel +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894  
[www.monlab.es](http://www.monlab.es) [mn.atcliente@monlab.es](mailto:mn.atcliente@monlab.es)





# Lector pruebas rápidas



SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

## Skannex® lector de pruebas rápidas



### Características principales



-SkanFlexi® es un lector para pruebas rápidas en placa.

-Especialmente útil en la lectura de cassetes multiparamétricos, como pueden ser las pruebas multidrogas de 5, 10 o 12 parámetros.

-Lectura fácil y rápida. 1 solo click en su pantalla táctil y en 15 segundos tendrá el resultado en pantalla de todos los analitos y una foto escaneada de la placa que podrá guardar junto al resultado del paciente si lo desea.

-Posibilidad de transmitir los resultados al LIS a través de un puerto Ethernet.

-Si no lo tiene conectado a su red, posibilidad de guardar los últimos 10000 resultados en su memoria.

-Pantalla táctil . Software intuitivo. En 5 minutos aprenderá a utilizarla.

-Software actualizable por internet o USB.

-2 puertos USB para conectar impresora o lector de código de barras o teclado externo o memoria USB.

**POSIBILIDAD DE LEER OTRAS PRUEBAS RÁPIDAS, NO SÓLO DROGAS (FOB, PILORY, RSV...)**

### ¿Cómo usar SkanFlexi® ?



1- Abrir tapa.



2- Seleccionar prueba a analizar.



3- Colocar prueba.



4- Cerrar tapa.



5- Iniciar lectura.



6- Esperar 15 segundos.



7- Visualizar resultados, identificar muestra, añadir comentarios, enviar on-line...



005

MONLAB SL – Carrer Selva de Mar, 48 - 08019 Barcelona  
Tel : Tel +34 934 335 860 Fax +34 934 363 894  
www.monlab.es mn.atcliente@monlab.es

