

Covid-19 Ag

NUEVA VERSIÓN - Diluyente Predispensado

1 Contenido KIT



1u.
Control+




X20
Tests



X20
Viales con diluyente



X20
Hisopos

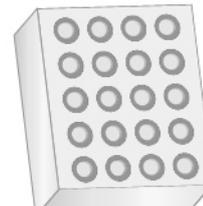


1u.
Gradilla



1u.
Instrucciones


2 Preparación

Abrir el vial con diluyente, por el tapón azul y dejar preparado en la gradilla

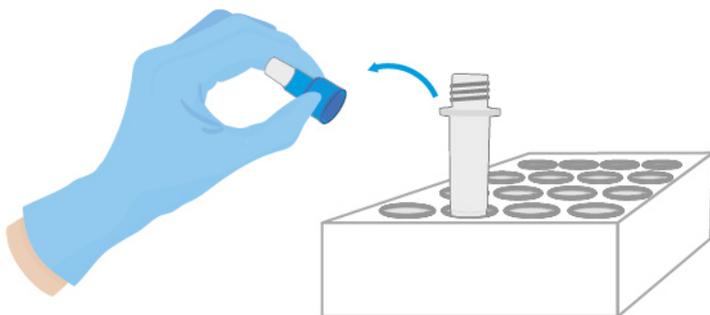

3 Hisopo

Extraer el bastoncillo de su envase por el extremo del mango

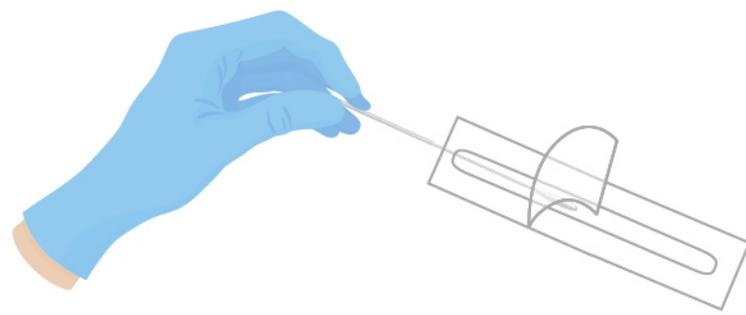

4 Recogida de muestra LEER ATENTAMENTE



Este test, se caracteriza porque la muestra puede ser tomada de dos formas diferentes, de forma nasofaríngea o de forma nasal.

A continuación se detallan los dos procedimientos:
USE SOLO UNO DE ELLOS.

4.1 Recogida de muestra nasofaríngea

Frote la superficie nasofaríngea posterior y haga girar el hisopo varias veces. Repita la operación en ambos orificios.




Covid-19 Ag

NUEVA VERSIÓN - Diluyente Predispensado

4.2 Recogida de muestra nasal

La punta del hisopo debe introducirse de 2 a 4 cm, hasta que se note resistencia.

Girar el hisopo 5 veces por la mucosa para asegurarse de que se obtienen mucosidad y células, repetir el proceso en la otra fosa nasal con el mismo hisopo. para asegurarse de que se obtiene una cantidad La muestra ya estará lista.

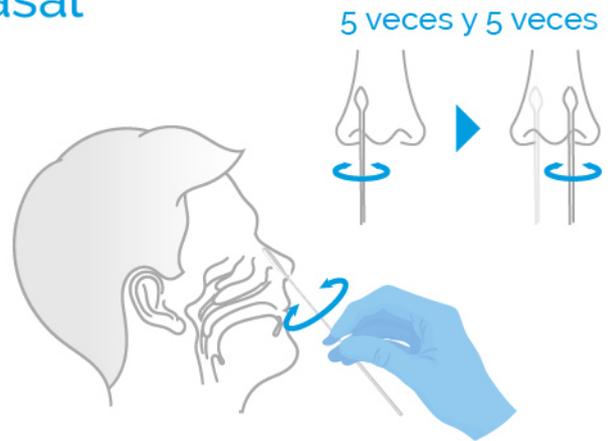

5 Dilución

Introduzca el hisopo en el tubo y girelo al menos 6 veces mientras presiona el tubo desde el exterior durante 15 segundos



6 Dispensar

Tapar el tubo con el tapón azul. Desenroscar el tapón pequeño para convertir el tubo en una pipeta, dispensar presionando 3 gotas en el test.



7 Esperar



8 Resultados



NEGATIVO POSITIVO INVÁLIDOS

